

# BARRIER® Beach chair skulderafdækning



- Væskeopsamlingspose giver effektiv væskekontrol
- Stor alt-i-en afdækning til skulderkirurgi udført i en beach chair/siddende stilling
- Hurtig alt-i-en drapering
- Væsketæt for at forebygge væskegennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion

## Draperingsvejledning



1. Start med at placere slidslagnet på patienten.



2. Placér slidsen så bredt som muligt rundt om patientens skulder.



3. Placér stockinetten.



4. Fold skulderafdækningen ud én gang og tag derefter patientens hånd og træk den gennem åbningen.



5. Fjern beskyttelsepapirerne og placér hullet så langt oppe på skulderen som muligt. Fold afdækningen ud.



6. Fold afdækningen ud mod patientens fødder og derefter over patientens hoved mod anæstesiøjlen.



7. Tilpas væskeopsamlingsposen som ønsket. Aftapningsstudsene kan forbindes til sug hvis nødvendigt.

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse, absorption	Pakning
60003	Beach chair skulderset: 1 × Forstærket assistancebordspose 4 × Papirhåndklæder 1 × Slidslagen (plast), slids 15 × 61 cm 1 × Stockinette 2 × OP-tape 1 × Beach chair skulderafdækning, hul 10 × 10 cm, elastisk 1 × Forstærket bordafdækning	79 × 145 cm 18 × 25 cm 150 × 193 cm S 9 × 49 cm 400 × 240 cm 150 × 190 cm	65 × 85 cm     75 × 190 cm	4 / 8
60004	Beach chair skulderafdækning, hul 10 × 10 cm, elastisk	400 × 240 cm		6 / 12

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® Procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® Procedurepakke komponent	Størrelse
70004	Beach chair skulderafdækning, hul 10 × 10 cm, elastisk	400 × 240 cm

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0272003