


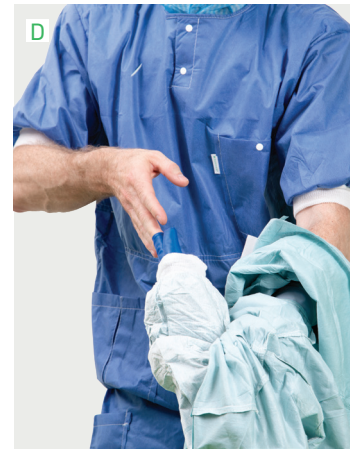

Aftagning af operationskittel og handsker

Aftagning af beskyttet kittel og handsker

- Behold handskerne på og tag fat i kitlen ved livet.
- Træk kitlen væk fra din krop for at bryde bindebåndene.
- Mens du fjerner kitlen, vender du vrangen ud på kitlen og krøller den sammen. Rør kun ved ydersiden af kitlen med behandskede hænder.
- Træk handskerne af mens du fjerner kitlen. Rør kun indersiden af handskerne og kitlen med bare hænder.
- Smid kittel og handsker væk og desinficér hænderne.

Hvis handskerne ikke kommer af sammen med kitlen, skal du smide kitlen væk og bruge handske mod handske, hud mod hud teknikken brugt på bilde F og G for at fjerne handskerne. Desinficér derefter hænderne.

- Fjern den første handske ved at bruge handske mod handske teknikken.
- Fjern den sidste handske ved at bruge hud mod hud teknikken. Desinficér hænderne.

Bemærk

Hvis brugeren ikke kan bryde bindebåndene, og der ikke er en assistent til at binde båndene op, skal handskerne fjernes først med handske mod handske, hud mod hud teknikken. Håndhygiejne bør udføres før kitlen fjernes, og kun indersiden af kitlen berøres. Afslut med at udføre håndhygiejne endnu en gang.



Baseret på: AORN Guidelines for Perioperative Practice, 2019. Guideline for Transmission Based Precautions. pgs 1098-1104. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommended sequences for donning and doffing of PPE. <https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf>

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0712006