

BARRIER® Urologi /TUR sæt



- Integreret væskeopsamlingspose for effektiv væskekontrol
- Integreret si for enkel og sikker opsamling af prøver
- Integreret fingertut for sikker rektal palpation
- Integreret pose til fjernelse af væske under operationen
- Fås i to størrelser for at passe til forskellige draperingsbehov
- Ugennemtrængelige materialer giver optimal patientsikkerhed
- Optimal folding for aseptisk applicering, enkel at drapere for én person

Draperingsvejledning



1. Placér afdækningen i den rette retning. Se piktogrammet.



2. Åben afdækningen mellem patientens ben. Bemærk fodpilene (piktogram).



3. Fold afdækningen ud.



4. Drapér ét ben.



5. Drapér det andet ben.



6. Fold afdækningen ud over benene og fortsæt mod patientens hoved og anæstesiøjlen.



7. Draperingen er nu afsluttet.

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
888222	TUR sæt: 1 Papirhåndklæde 1 Slangeholder med klæb 1 TUR afdækning med pose, huller 8 cm og 5 cm, fingertut 1 Bordafdækning, 75 x 190 cm absorberende område	9 x 18 175/270 x 180 150 x 190	6/12
888224	TUR sæt: 1 Papirhåndklæde 1 Slangeholder med klæb 1 TUR afdækning med pose/bundafløb, huller 8 cm og 5 cm, fingertut 1 Bordafdækning, 75 x 190 cm absorberende område	9 x 18 175/270 x 180 150 x 190	7/14
888225	TUR sæt: 1 Papirhåndklæde 1 Slangeholder med klæb 1 TUR afdækning med si, huller 8 cm og 5 cm, fingertut 1 Bordafdækning, 75 x 190 cm absorberende område	9 x 18 175/270 x 180 150 x 190	7/14
888227	TUR afdækning med pose, huller 8 cm og 5 cm, fingertut	175/270 x 240	8/16

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str. (cm)
965527	TUR afdækning med pose, huller 8 cm og 5 cm, fingertut	175/270 x 240
965522	TUR afdækning med pose/bundafløb, huller 8 cm og 5 cm, fingertut	175/270 x 180
965520	TUR afdækning med pose, huller 8 cm og 5 cm, fingertut	175/270 x 180

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0512004

Mölnlycke®