

BARRIER® Universalsæt – standard



Et bredt sortiment af væsketætte og fleksible draperingsløsninger til næsten ethvert indgreb.

- Kraftig forstærkning omkring operationsfeltet
- Væsketæt overalt på afdækningen
- Effektiv væskekontrol med absorption
- Integrerede klæbekanter
- Enkel at drapere for én person
- Integrerede slangeholdere

Draperingsvejledning



1. Fjern beskyttelsespapiret fra afdækningen med klæb.



2. Fiksér afdækningen langs patientens side begyndende ved skulderen. Følg kroppens konturer mens du passer på ikke at strække materialet.



3. Hold afdækningen med klæb (175x175) i folden. Fjern den midterste del af beskyttelsespapiret.



4. Placér den foldede afdækning over midten af brystkassen.



5. Fjern resten af beskyttelsespapiret og fiksér kanterne.



6. Fold resten af afdækningen ud over patientens ben.



7. Placér den store afdækning over midten af patientens bryst. Fjern resten af beskyttelsespapiret og fiksér kanterne.




8. Fold resten af afdækningen ud over anæstesiøjlen og fiksér sug og diatermi.

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse (cm)	Pakning
699054	Universalsæt standard: 1 assistancebordspose 2 afdækning med klæb 4 papirhåndklæder 1 OP-tape 1 afdækning med klæb 1 afdækning med klæb 1 bordafdækning	79 × 145 90 × 75 18 × 25 9 × 49 175 × 175 150 × 240 150 × 190	6 / 12

Alt specificeret sætindhold er tilgængelig til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Størrelse (cm)
967772	1 afdækning med klæb	175 × 175
967773	1 afdækning med klæb	150 × 240

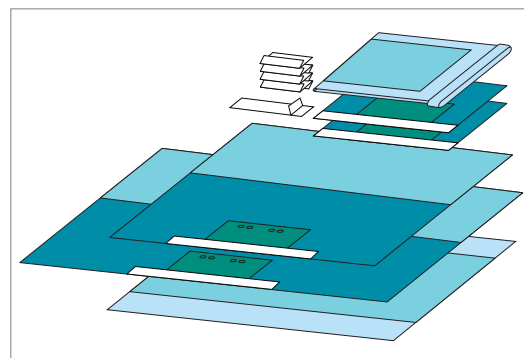

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0362004



Mölnlycke®