



## BARRIER® Flex universalsæt

- Fleksible, selvklæbende kanter, som former sig efter kroppens konturer, hvilket giver en mere sikker drapering
- Elastiske kanter for at bibeholde en sikker forsegling, når kroppen flyttes eller drejes, samt ved insufflation under laparoskopiske indgreb
- Klæben giver en sikker afslutning selv ved kontakt med overskydende væske
- Tredelt beskyttelsespapir på afdækningens kanter gør det muligt at klæbe afdækningen helt eller delvist på patienten
- Effektiv absorption hjælper med at bibeholde et tørt arbejdsområde
- Patentanmeldt. Kun tilgængelig hos Mölnlycke
- Optimal patientsikkerhed med 100% impermeable materialer
- Foldet for at sikre aseptisk applicering. Enkel at drapere for én person

## Draperingsvejledning for abdominalkirurgi\*



1. Fjern den midterste del af beskyttelsespapiret (nr. 1) fra afdækningerne med klæb. Hvis den fulde længde skal bruges, fjernes også de andre dele af beskyttelsespapiret.



2. Fikser afdækningerne med klæb ned langs patientens sider. Begynd ved skuldrene. Følg kroppens konturer og stræk materialet let.



3. Hold afdækningen (175x175) i folden. Fjern den midterste del af beskyttelsespapiret.




4. Placer den foldede afdækning over midten af abdomen.



5. Fjern det resterende beskyttelsespapir og fikser kanterne.



6. Fold afdækningen ud over patientens ben.

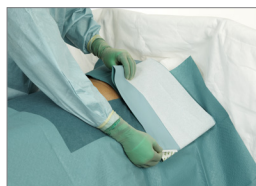

7. Fjern den midterste del af beskyttelsespapiret på den store afdækning. Placer afdækningen over midterlinjen af brystet. Fjern resten af beskyttelsespapiret og fikser kanterne.



8. Fold resten af afdækningen ud over anæstesiøjlen.

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
66010	Universal Sæt – BARRIER Flex 1 Assistancebordspose 79x145 cm 4 Papirhåndklæder 18x25 cm 1 OP-tape 9x49cm 2 Afdækninger m/klæb 90x75 cm - BARRIER Flex 1 Afdækning m/klæb 175x 175 cm - BARRIER Flex 1 Afdækning m/klæb 300x 175 cm - BARRIER Flex 1 Bordafdækning 150x 190 cm	5/10
66020	Universal Sæt – BARRIER Flex 4 Papirhåndklæder 18x25 cm 1 OP-tape 9x49cm 2 Afdækninger m/klæb 90x75 cm - BARRIER Flex 1 Afdækning m/klæb 175x 175 cm - BARRIER Flex 1 Afdækning m/klæb 300x 175 cm - BARRIER Flex	6/12
66001	Afdækning m/klæb 90x75 cm - BARRIER Flex	22/132
66002	Afdækning m/klæb 175x 175 cm - BARRIER Flex	15/30
66003	Afdækning m/klæb 300x 175 cm - BARRIER Flex	12/24

\*Draperingsvejledning for halskirurgi kan rekvireres

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf. 48 168 268. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til et eller flere af virksomhederne i  
Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0641709

Mölnlycke®