

Handskepåtagnings for Biogel® Indicator® Systemer

'ASSISTERET påtagning'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet¹



1. Placer fingrene på hver hånd under det ombukkede skaft (ca. 10 cm fra handske-manchet kanten) på den farvede inderhandske. Handskens håndflade skal være vendt mod den ubehandskede persons hånd med handsken lige ud for persons tommelfinger. Brug fingrene til at strække manchetten for at åbne handsken.

Den ubehandskede person stikker derefter sin hånd ind i handsken med et fast, nedgående tryk.



2. Gentag for den anden hånd. Personen, der får handsker på, kan hjælpe med påtagningen ved at tage fat på handske-manchetten.



3. Når de halmfarvede yderhandsker skal tages på, kan personen, der får handsker på, hjælpe med påtagningen ved at tage fat i manchetten og trække udad for at åbne handsken.



4. Sørg for, at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.



5. Gentag for den anden hånd og tryk kanten af handskens manchet godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



6. Når handskepåtagnings og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



7. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



8. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



9. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovejledning til påtagning af kittler og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0031901


Mölnlycke®