


# Alldress®

## Absorberende, åndbar og selvklæbende bandage

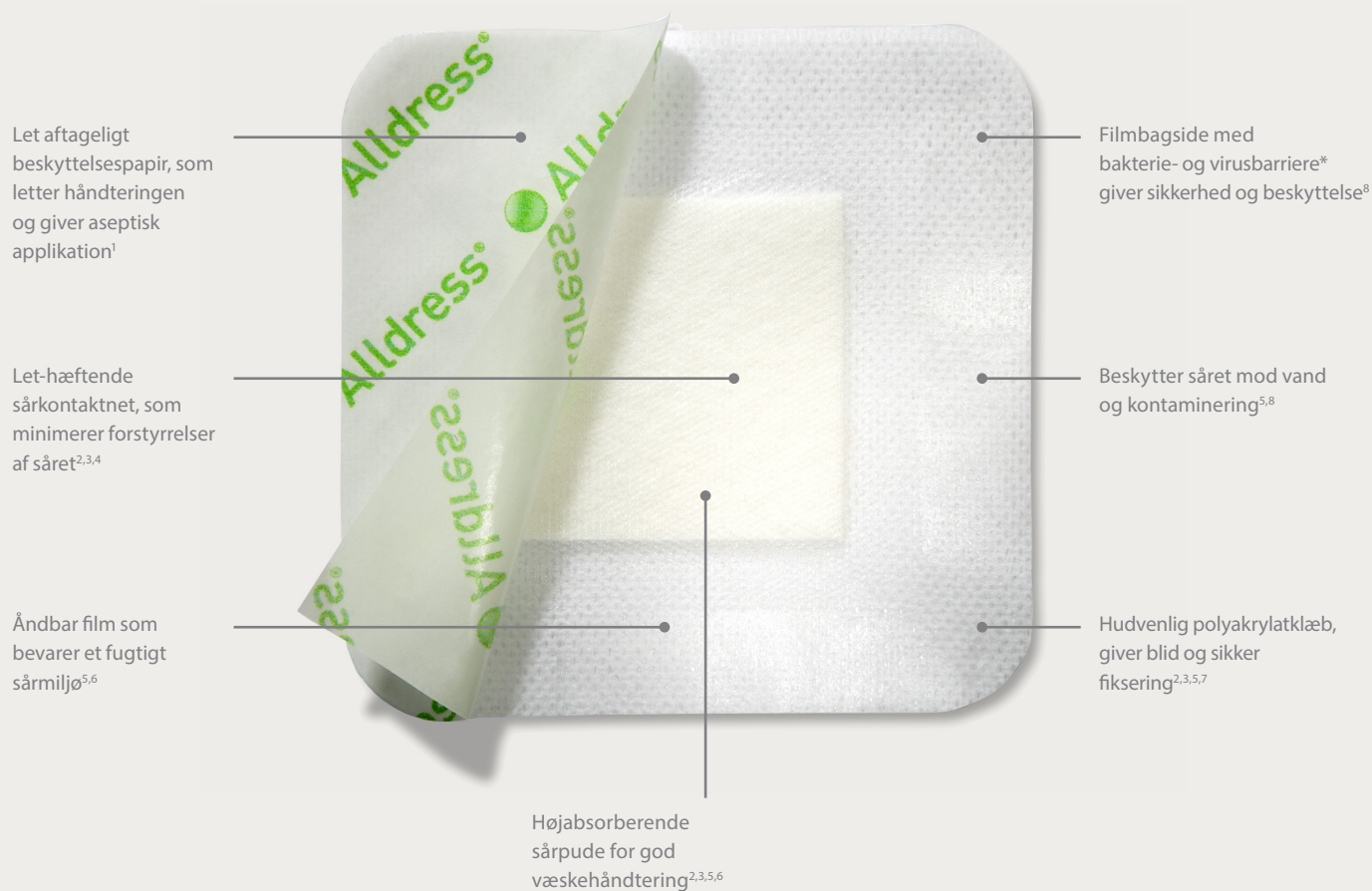

Alldress® er en alt-i-en selvklæbende, absorberende bandage, der er ideel til en lang række let til moderat væskende sår, som enten primær- eller sekundærbandage. Filmbagsiden sikrer et fugtigt sårmiljø og beskytter mod vand og kontaminering.

## Sådan anvendes Alldress®



1. Åben emballagen og tag den sterile bandage ud.



2. Fjern den ene halvdel af beskyttelsespapiret.



3. Placér bandagen på huden og fjern den anden halvdel af beskyttelsespapiret. Udglat bandagen for at opnå optimal vedhæftning. Må ikke strækkes under påsætningen!

## Sådan virker Alldress

Alldress® har et lethæftende sårkontakt-net. Den absorberende sårpude absorberer eksudat og minimerer risikoen for maceration af den omkringliggende hud<sup>2,3,5,6</sup>.

Den blide, vandbaserede klæb holder bandagen sikkert på plads<sup>2,3,5,7,9</sup>.

Den semipermeable film opretholder et fugtigt sårmiljø og har virus- og bakteriebarriere\*.

Den glatte overflade reducerer friktion mod sengetøj og beklædning og sikrer, at bandagen bliver på plads.

## Anvendelsesområder

Alldress kan anvendes på en lang række åbne og lukkede sår, både tørre og væskende.

- Primærbandage til åbne og lukkede sår
- Sekundær bandage til åbne sår sammen med geler og alginater<sup>2,3,5</sup>

## Bandageskift

Alldress kan sidde på i flere dage,<sup>2,3,4</sup> afhængig af såret og hudens tilstand eller ifølge lægens anbefaling. Bandagen aftages ved at tage fat i kanten og langsomt trække den af i hårvækst retningen.

\* mikrober større end 25 nm

## Fordele ved Alldress

- Åndbar og opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø<sup>6,9</sup>
- Minimerer risikoen for maceration<sup>2,3,6,9</sup>
- Vandtæt filmbagside<sup>9</sup>
- Filmbagsiden har bakterie- og virusbarriere\*<sup>8</sup>
- Nem at anvende<sup>9</sup>
- Hudvenlig, vandbaseret klæb<sup>9</sup>

## Forbehold

Alldress bør ikke anvendes til inficerede sår uden at konsultere læge.

## Alldress er pakket sterilt i enkelte pakninger

Varenr.	Str. cm	Sårpude str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp. krt.
265320	10 x 10	5 x 5	10	100
265340	10 x 15	10 x 10	10	100
265360	15 x 20	10 x 15	10	100

Referencer: 1. Molnlycke Health Care. Data on file, 2019. Validation with health care professionals. Internal reference PD-572712. 2. Gray, D.G., Russell, F., Flett, A., Cooper, P.J.; Mepore Ultra and Alldress: primary and secondary dressings - British Journal of Nursing, 2002 (Tissue Viability Supplement), Vol 11, No 20. 3. Gray, D.G., White, R., Russell, F., Cooper, P.J.; Secondary wound dressings: an evaluation of Alldress - British Journal of Nursing, 2002, Vol 11, No 17. 4. Molnlycke Health Care. T-1093 Fluid handling capacity. Data on file, 2019. 5. Molnlycke Health Care. Data on file, 2019. 6. Molnlycke Health Care; Data on File 2018. Registry study Report Alldress Nethealth data 2018. Molnlycke Health Care. Internal Reference: PD-568241. 7. Molnlycke Health Care. T-304 Tape test on human back. Data on file, 2019. 8. Molnlycke Health Care. Data on file, 2018. 9. Molnlycke Health Care. Data on file, 2019.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød, Danmark. Tlf.: +45 80 88 68 10. E-mail: [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com). Molnlycke, Alldress, Hypergel, Normigel, Mesalt og Melgisorb varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Molnlycke Health Care gruppen. © 2020 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0192004

Molnlycke®