

Mepitel® Film

Hudbeskyttende filmbandage



Blid^{1,2,3}

- Safetac® laget minimerer patientens ubehag ved fjernelse af bandagen^{1,2}

Nem at anvende^{2,4}


- Papirramme
- Støttende beskyttelsesfolie

Meget beskyttende

- Blød, tynd, åndbar og brusetæt film, som er meget formbar og giver en optimal patientbeskyttelse og komfort^{1,2}
- Landing zone til aggressive tape, der anvendes til at fikse udstyr til hud⁵
- Over IV-steder, når IV-udstyret er sikret ved hjælp af klæbende tape eller suturer⁵
- Reducerer markant sværhedsgraden af hudreaktioner ved strålebehandling^{2,3,4}
- Forbliver på i flere dage^{1,3,6}

Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.

I adskillige, randomiserede forsøg, er det klinisk bevist, at bandager med Safetac® minimerer skade på såret og huden ved fjernelse. Ved at forsegle sårkanterne, hjælper bandagerne med at forhindre maceration. Med mindre skade på såret og huden, minimeres smerte ved bandageskift. Derfor forbinder flere randomiserede undersøgelser bandager med Safetac med hurtigere heling og lavere, samlede behandlingsomkostninger.

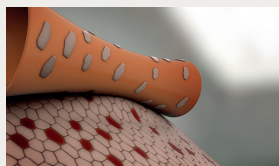

Uden Safetac



Med Safetac

- Blid^{1,2,3}, steril, transparent, åndbar og klæbende blød silikone filmbandage
- Beskytter skrøbelig og følsom hud^{1,2,3}
- Minimerer smerte og hudskader for patienten ved bandageskift^{1,2}
- Kan anvendes både som primær og sekundær bandage
- Nem at applicere takket være dens appliceringssystem^{2,4}

Sådan anvendes Mepitel® Film



1. Rens huden i henhold til klinisk praksis. Tør huden grundigt.

Fjern beskyttelsesfilmen (påtrykt Safetac) og applicér den klæbende side på den skrøbelige hud (eller den primære bandage) og glat Mepitel® Film på huden for at sikre en god forsegling. Stræk ikke bandagen under appliceringen.



2. Fjern papirrammen.



3. For bedst resultat bør Mepitel Film dække den omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for de mindre størrelser (størrelser op til 10x12 cm) og 5 cm for de større størrelser for sikker fiksering. Hvis bandagens kanter begynder at krølle, skal du forsigtigt skære disse kanter af for at øge anvendelsestiden.

Sådan virker Mepitel Film

Mepitel Film er en blid, steril, transparent og åndbar filmbandage. Filmbandagen understøttes af en papirramme, så den er nemmere at applicere.

Anvendelsesområder

Mepitel Film er udviklet til at beskytte skrøbelig og følsom hud og minimere risikoen for nedbrydning af huden. Den kan anvendes som sekundær bandage til fiksering af f.eks. gaze eller non-woven kompresser eller som landing zone til aggressive tapes for at fikserer udstyr til huden. Den kan anvendes som en beskyttende bandage over IV-steder, når IV-udstyret er fikseret med klæbende tape eller suturer.

Advarsel

Må ikke anvendes som primær fiksering til livsbevarende udstyr.



Referencer: 1. Meuleneire F. A vapour-permeable film dressing used on superficial wounds. British Journal of Nursing, 2014. 2. Møller PK, et al. Breast cancer patients report reduced sensitivity and pain using a barrier film during radiotherapy – A Danish intra-patient randomized multicentre study. Technical Innovations and Patient Support in Radiation Oncology, 2018. 3. Herst P, et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiotherapy and Oncology, 2014. 4. Wooding H, et al. The effect of Mepitel Film on acute radiation-induced skin reactions in head and neck cancer patients: A feasibility study. British Journal of Radiology, 2018. 5. Mölnlycke Health Care. Data on file. 6. Kazanavicius M, et al. The use of modern dressings in managing split-thickness skin graft donor sites: a single-centre randomised controlled trial. Journal of Wound Care, 2017.

Forholdsregler

- Anvend ikke Mepitel Film til patienter eller brugere med kendt overfølsomhed over for produktets materialer eller komponenter.
- Må ikke genanvendes. Hvis produktet genanvendes, kan det begynde at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminering.
- Mepitel Film er ikke et sårkontaktlag og muliggør ikke overførsel af ekssudat til en sekundær bandage.
- Hvis mere end ét produkt anvendes, og de overlapper hinanden, reduceres åndbarheden. Dette kan medføre, at overskydende fugt ikke kan passere væk fra huden.
- Må ikke anvendes som primær fiksering af IV-katetre, kanyler, infusion eller andre udstyr.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage (steril barriere) er beskadiget eller har været åbnet før anvendelse.
- Må ikke re-steriliseres.
- Hvis du ser tegn på infektion såsom feber, eller når såret eller den omkringliggende hud bliver rød, varm eller hævet, skal du konsultere sundhedspersonalet for passende behandling.

Mepitel Film sortiment (sterilt pakket)

Varenr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt
296170	6 x 7	10	50
296270	10 x 12	10	70
296470	10 x 25	10	50
296670	15 x 20	10	70

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: + 45 80 886 810, e-mail: info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke, Mepitel og Safetac varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Mölnlycke Health Care-gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0662012

