

BARRIER® Champ d'épaule pour position semi-assise



- Poche de recueil de liquides intégrée pour un contrôle efficace des liquides
- Champ tout-en-un de grande taille pour les chirurgies de l'épaule pratiquées en position assise/semi-assise
- Pliage optimal pour une application aseptique
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient



1. Commencez par poser le champ fendu sur le patient.



2. Appliquez le champ sur le périmètre le plus large possible autour de l'épaule du patient.



3. Faites glisser la stockinette sur le bras.



4. Ouvrez un des plis du champ, agrippez la main du patient et faites-la passer dans l'ouverture.



5. Retirez les papiers protecteurs et faites remonter l'ouverture aussi haut que possible sur l'épaule. Dépliez le champ.



6. Dépliez le champ vers les pieds du patient, puis audessus de sa tête en direction de l'arc d'anesthésie.



7. Positionnez la poche servant à recueillir les fluides à votre convenance. En cas de besoin, le port de drainage peut être connecté au tube d'aspiration.

| N° de réf. | Codes stériles | Dimensions | Surface absorbante | Disp/Trp |
|------------|---|---|---|----------|
| 60003 | Trousse d'épaule pour position semi-assise 1 x housse de Mayo renforcée 4 x serviettes absorbantes 1 x film à inciser (plastique), fente 15 x 61cm 1 x stockinette 2 x bandes adhésives 1 x champ d'épaule pour position semi-assise, ouverture 10 x 10cm élastique 1 x versterkt instrumentenveld | 79 x 145cm 18 x 25cm 150 x 193cm 22 x 75cm 9 x 49cm 400 x 240cm 150 x 190cm | 65 x 85cm 75 x 190cm | 4 / 8 |
| 60004 | Champ d'épaule pour position semi-assise, ouverture 10 x 10cm élastique | 400 x 240cm | | 6 / 12 |

Tous ces composants des trousse peuvent également être inclus dans les trousse composites Mölnlycke®.

| N° de réf. | Composant des trousse composites Mölnlycke® | Dimensions |
|------------|---|-------------|
| 70004 | Champ d'épaule pour position semi-assise, ouverture 10 x 10cm élastique | 400 x 240cm |

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke et BARRIER sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00811702)

